



SARL Les ATELIERS de FRANCA  
50 route de Colmar  
68040 INGERSHEIM - FRANCE  
[franca@franca-g.fr](mailto:franca@franca-g.fr)  
[christelle@franca-g.fr](mailto:christelle@franca-g.fr)

NOTICE EXPLICATIVE

**Cette notice est évolutive en fonction des évolutions législatives.**

**Nous demandons à nos utilisateurs de la consulter régulièrement en ligne pour être informés au plus juste.**

**Il est important de lire la notice avant toute utilisation.**

**Nous sommes régulièrement en veille pour être le plus efficace et le plus conforme possible au regard des recommandations AFNOR et des préconisations évolutives lié au contexte de crise sanitaire.**

**Nous vous rendons attentifs à l'acquisition de masques venant de l'importation soumis à des réglementations et contrôles différents que ceux de fabricants nationaux.**

**Nous nous efforçons d'être le plus transparents possible.**

## **1. LE CADRE**

Dans le contexte de crise sanitaire majeure associée à une pénurie de masques, nos masques proposés sont une alternative à l'absence de masques ou à un masque confectionné par soi-même.

Les masques les plus efficaces face aux malades du COVID 19 sont les FFP2 et FFP3 et les masques chirurgicaux répondants aux normes des dispositifs médicaux. Ces masques sont réservés aux professionnels de santé en contact avec des patients COVID-19.

**Les masques FFP1, FFP2 et FFP3 et les masques chirurgicaux à usage sanitaire sont homologués, contrairement aux masques grand public, qui eux suivent les recommandations AFNOR.**

Le masque est destiné à éviter, lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes » ou « aérienne ».

Pour ne pas exposer les autres personnes ou professionnels au virus, les masques en tissu restent une alternative **acceptable en terme de prévention** et uniquement à titre de prévention.

**Ce masque est une première barrière dit de sécurité.**

Nos masques ne prétendent pas se substituer aux masques normalisés (FFP1, FFP2, IR, IIR) et n'est pas un dispositif médical au sens Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (comme masque filtrant de type FFP2).

Nous sommes au quotidien en veille sur les évolutions. Nos partenaires locaux du textile mettent toutes leurs compétences pour améliorer les solutions barrières.

**LE MASQUE BARRIÈRE N'EXONÈRE ABSOLUMENT PAS DE L'APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES COMPLÉTÉE, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, PAR LA MESURE DE DISTINCIATION PHYSIQUE QUI SONT TOUTES LES DEUX ESSENTIELLES.**

## **2. QUI PEUT UTILISER CES MASQUES DE PRÉVENTION**

Ces masques sont réservés de toute personne entrant en contact avec du public et ayant besoin d'une protection à titre préventif pour se protéger des gouttelettes de salive dues aux postillons ou aux éternuements.

Par exemple, les commerçants de bouche, des agents de l'administration, des forces de l'ordre, des transporteurs, des banques, divers professionnels, des aides à domicile qui ne sont pas en contact direct avec les patients Covid-19 ...ou des particuliers.

Ce masque est adapté pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans (voir avant en fonction de la morphologie).

## **3. DESCRIPTION DE CE MASQUE ou de ce COUVRE VISAGE**

Ce masque est fabriqué en tissu technique composé de 3 couches toutes lavable à 60 ° degré.

- 1 couche de polyester/coton
- 1 couche ouatine 100% coton en guise de filtre
- 1 couche polyester/coton

NOS FOURNISSEURS DE TEXTILE ONT DÉPOSÉ LES DOSSIERS POUR TESTER LES TISSUS et DÈS QUE POSSIBLE NOUS VOUS COMMUNIQUERONS LES TESTS DE PERFORMANCE (taux de respirabilité et taux filtration).

**VEILLEZ TOUJOURS QUE LE MASQUE EST BIEN AJUSTÉ ET COUVRE VOTRE BOUCHE ET VOTRE NEZ.**

#### 4. OBJECTIFS DE CETTE NOTICE

Informez les utilisateurs au bon usage de ces masques de prévention.

**Nous recommandons une utilisation stricte des consignes énoncées ci-dessous, car le risque est que les professionnels hors santé n'aient pas l'habitude d'utiliser des masques et ne maîtrisent pas forcément les règles d'hygiène adéquates.**

#### 5. ENTRETIEN DES MASQUES

**Entretien du masque: Lavage à 60°degré en machine cycle complet avec 30 minutes minimum à 60 degrés.**

Source AFNOR : « Il convient d'éviter tout contact entre un masque barrière porté et des articles vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques portés s'ils ne sont pas dans un contenant spécifique (sac plastique propre).

Une mesure complémentaire peut être, avant de procéder au lavage du masque barrière, de nettoyer son lave-linge en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage. L'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée.

Le lavage des masques barrières peut se faire avec des serviettes ou draps en machine, afin de garantir l'aspect mécanique du lavage.. »

#### 6. UTILISATION DES MASQUES

- Avant la première utilisation, laver les masques selon les indications ci-dessous.
- Avant de mettre le masque lavé, se laver les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes et bien sécher les mains avec une serviette propre ou à l'air libre et/ou utiliser du gel hydroalcoolique.
- Mettre le masque en le saisissant par sa partie centrale externe et en tenant l'élastique.
- Le masque doit être porté en couvrant le nez, le menton et la bouche. Il doit être appliqué hermétiquement sur le visage. Et doit être porté sur une peau nue (le port de la barbe réduit l'efficacité).
- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.
- Se laver les mains fréquemment ou utiliser du gel hydroalcoolique, car le professionnel risque de toucher le masque pendant qu'il travaille.
- Le masque est manipulé seulement pour la pose et le retrait (ne pas le repositionner), et toujours par les élastiques.
- **Changer le masque tous les 3 heures ou 4 heures. Veiller que cette consigne soit respectée.**

- A l'issu des 3 heures, le masque aura fait son travail et le tissu aura des bactéries, **il ne faut surtout pas le toucher.**
- Après usage, **retirer le masque en saisissant** par les élastiques sans toucher la partie avant du masque. Fermer les yeux et la bouche avant de le retirer.
- Mettre les masques souillés dans une boîte hermétique ou sachet et fermer jusqu'au lavage.
- Se laver les mains au savon ou/et avec du gel hydroalcoolique après retrait.
- Récupérer les masques et les laver. Soit en machine à laver de 60 degrés avec du détergent classique. Porter des gants ou bien se laver les mains après la manipulation.
- Faire très bien sécher de préférence au sèche-linge. Attention l'humidité participe à la prolifération des bactéries.
- Les stocker hermétiquement.
- Distribuer avec des mains propres ou avec le port de gant.

## 7. DURÉE DE VIE DU MASQUE

Les masques ont un usage limité. Tout masque qui semble abimé ou présentant un défaut, doit être jeté. La durée de vie de nos masques est estimée à au moins 20/30 lavages selon notre expérience.

Les précautions et les instructions mentionnées ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles.

**Changer le masque dès qu'il est mouillé. Veiller que cette consigne soit respectée.**

Source AFNOR : « Durant une même période de 4 heures max, le masque ne peut servir plusieurs fois que s'il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contacts possible, et remis selon les consignes.

La durée de port doit être conforme à la notice d'information si existante. Dans tous les cas, elle ne sera pas supérieure à 4 heures sur une seule journée. »

## 8. RESPONSABILITÉS

Nous sommes **tous acteurs des règles d'hygiène et de sécurité** et l'utilisateur doit bien comprendre que le bon sens et l'attention et le respect des règles sont des facteurs indispensables pour une bonne utilisation du masque et son efficacité.

Nous préconisons de **nommer un responsable qui veillera à la bonne utilisation de ces masques et des gestes barrières.** C'est la clé de la réussite.

Nous rendons aussi attentif aux incidences psychologiques qui s'installent dans la durée.  
Le masque a un effet psychologique qui rassure.

Néanmoins, si votre employé est malade ou vous même ou si vous avez une maladie chronique ou un déficit immunitaire : **demandez l'avis au médecin traitant** pour l'utilisation de masques adaptés.

**En aucun cas la société « les Ateliers de Franca » ne pourra être tenue responsable de toute mauvaise utilisation des masques ou du non-respect des règles précédemment édictées.**

## 8. DISTRIBUTION

Pour toute commande ou renseignements, appeler ou adresser un sms à MOEGLÉN Christelle au 06 03 61 36 97 ou par mail [christelle@franca-g.fr](mailto:christelle@franca-g.fr)

## 9. PRIX

L'achat de ces masques contribue à financer la main d'œuvre, les fournitures et la TVA. Une partie des bénéfices permet de financer l'action de Solidarité des Ateliers de Franca sur le Département.

Malgré les fluctuations de certains prix de fournitures, nous nous efforçons de maintenir un 1<sup>er</sup> prix à 7€ TTC.

Le masque lavable est vendu à l'unité ou par lot.

**Le tarif pour un masque est de 7 € TTC pour un uni et 9 € TTC pour un imprimé coloré.**

Pour les entreprises assujettis à la TVA :

Le prix unitaire du masque uni est de 5,83 HT  
A partir de 200 masques, le prix est de 5,40 HT

Les prix sont susceptibles d'évoluer car suite à la pénurie de tissus et d'élastiques, certains fournisseurs modifient les prix au jour le jour.

**Nous veillons au quotidien à vous maintenir un prix stable et calculé au plus juste.**

## 10. LIVRAISON

Nous organisons des permanences au 50 route de Colmar à Ingersheim certains jours en fonction des productions et des stocks disponibles.

Nous vous communiquerons un horaire pour récupérer vos masques afin de pouvoir répondre à votre commande et réguler le flux de personnes et répondre au maximum les règles de distanciation physique.

Nous avons également la possibilité de vous envoyer les masques par la poste avec un supplément pour les frais de port de 9 €.

Pour les commandes supérieures à 100 masques, nous vous demandons d'organiser la récupération de la marchandise par un transporteur.

## 11. CONTACTS

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions et informations.

La situation est exceptionnelle et nous sommes tous dans l'apprentissage de la gestion de cette crise. Cette notice peut être évolutive en fonction des informations dont nous disposons.

Nous sommes en veille et en contact avec l'ensemble des professionnels.

Pour toutes questions techniques, appeler ou faire un sms à GRILLO Franca au 06 26 70 16 46

Pour toute commande ou renseignements, appeler ou faire un sms à MOEGLEN Christelle au 06 03 61 36 97 ou par mail [christelle@franca-g.fr](mailto:christelle@franca-g.fr).

MERCI.

VOS ACHATS CONTRIBUENT À MAINTENIR DES EMPLOIS LOCAUX ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOTRE TERRITOIRE.

*Franca GRILLO*  
*Gérante*

Photo du masque porté :

